


## AGRADECIMENTO

Conhecemos a importância das órteses para os pacientes, familiares e cuidadores. Por isso desenvolvemos as peças com muito amor, para poder proporcionar conforto e saúde em momentos delicados da vida. Em nome de cada um da empresa, agradecemos sua confiança e desejamos que possa receber este alento.

## CONHECENDO O PRODUTO

O produto u-neck® é composto por um (01) estabilizador de cabeça, mandíbula, queixo, pescoço, nuca e cervical, por uma (01) cinta estabilizadora e uma (01) placa cervical.

**u-neck®**

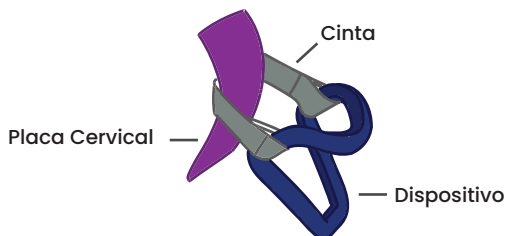

## FINALIDADE DO PRODUTO

O u-neck® se propõe a sustentar, estabilizar e amortecer a cabeça, maxilar, queixo, pescoço, nuca e cervical, devolvendo a cabeça à posição anatomofisiológica, evitando novas lesões, dores, engasgues, asfixias, problemas respiratórios; facilita a higiene e a respiração, proporciona conforto térmico, bem-estar físico, mental e social e possibilita seu uso até mesmo durante exames complexos, por não ter nenhum tipo de metal. Por não fechar a região da garganta, é possível o uso do u-neck® em pacientes com traqueostomia.

Recomenda-se o uso do u-neck® somente com prescrições fisioterapêuticas, médicas e de terapeutas ocupacionais, todos devidamente credenciados, qualificados e registrados em seus respectivos órgãos/conselhos de regulamentação profissional.

É importante que o comprador do u-neck®, profissional designado ou paciente com a devida indicação, tenha atenção no momento de compra.

É importante que conheça o propósito, o objetivo da utilização de seu u-neck® e escolha o tamanho adequado.

Caso o u-neck® seja utilizado para fins diversos de sua especificação, torna-se impossível garantir a total qualidade de suas funções.

Não nos responsabilizamos por danos causados à saúde do paciente por diferente uso do qual o u-neck® se propõe.

## TEMPO DE USO

De acordo com a prescrição médica ou profissional responsável pelo tratamento do paciente (fisioterapeuta, médico ou terapeuta ocupacional). Todos os profissionais devem ser devidamente qualificados, registrados e/ou credenciados em seus respectivos órgãos/conselhos de regulamentação profissional.

## INSTRUÇÕES DE USO




1. Delicadamente, posicione a cabeça do paciente, mantendo-a reta e elevada o mínimo possível para que possa ser colocado o dispositivo à sua frente, de modo que o maxilar e o queixo se acomodem acima da base frontal do dispositivo com o apoio centralizado no peito, sempre respeitando as limitações do paciente.



A placa pode ou não ser usada, de acordo com a prescrição do profissional responsável pelo tratamento.


Pacientes que não farão uso da placa cervical, seguir para a próxima etapa.  
Pacientes que farão o uso da placa, siga as instruções:

1. A placa sustentadora possui 02 (dois) passantes, que devem ficar na parte externa em relação ao paciente.  
Posição correta: com a área reta e mais longa, para baixo.
2. O próximo passo, é passar a cinta por dentro dos passantes.
3. Acomodar a placa de forma a estabilizar e apoiar a cabeça do paciente corretamente no acessório.

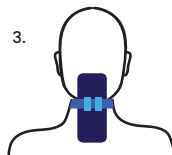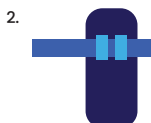
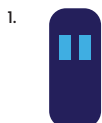


Última etapa:

1. Siga com a cinta passando por trás da nuca do paciente até chegar à frente.

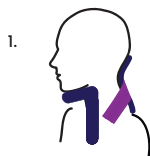

2. Passe a cinta por dentro do u-neck® (próximo ao pescoço) e feche-a na parte de fora no fecho de contato. Repita o procedimento do outro lado.
3. O maxilar e queixo devem estar acomodados sobre a órtese. O corpo deve estar corretamente posicionado, de maneira que o apoio central tenha contato total sobre ele.

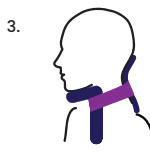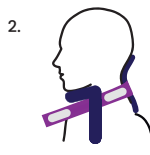

## **CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES**

Em todo momento da colocação do u-neck®, estar atento ao paciente e às suas necessidades, como respiração e conforto – pontos de extrema importância.

O tamanho do u-neck® é essencial para seu perfeito funcionamento e intenção!

O maxilar e queixo devem estar acomodados sobre o u-neck® e a posição do corpo deve estar correta, de maneira que o apoio central esteja com contato total sobre o corpo.

Não nos responsabilizamos pelo dano à saúde e/ou piora do quadro do usuário, decorrente de uso inadequado ou diferente daquela para qual o u-neck® foi desenvolvido, assim como autoprescrição ou prescrição por profissionais não devidamente qualificados – não limitando-se apenas a isso.

Em caso desse tipo de ocorrência, suspenda o uso e procure um profissional qualificado para o uso correto de seu u-neck®.

Recomendamos o uso de acordo com prévia prescrição médica ou do profissional responsável pelo tratamento (fisioterapeuta, médico e/ou terapeuta ocupacional).

A não observância de um ou mais termos anula a garantia.

Qualquer tipo de modificação e/ou adaptação estrutural; de forma; de geometria; de materiais, em um ou mais componentes do u-neck® – não limitando-se apenas a isto – cancela a garantia do u-neck®.

Observa-se também que sanções jurídicas podem ser aplicadas.

Ao se manifestar qualquer sintoma adverso (coceira, irritações) provocado pelo uso do produto, suspenda imediatamente a sua utilização e procure um médico. Não nos responsabilizamos pelo dano à saúde do usuário decorrente de uso inadequado ou diferente daquela para qual o u-neck® foi desenvolvido, ou prescrito pelo médico/profissional responsável e da inobservância de qualquer uma das recomendações presentes nessa bula – não limitando-se a dores e lesões. Em caso desse tipo de ocorrência, suspenda o uso e procure um profissional qualificado para o uso correto de seu u-neck®.

É possível utilização em hidroginástica e no banho.

## **CONTRAINDICAÇÕES**

Não utilizar o u-neck® andando de bicicletas, skate, patins e patinetes e/ou conduzindo automotorizados.

Atividades físicas ou práticas esportivas somente com acompanhamento ou supervisão de fisioterapeutas, médicos e/ou terapeutas ocupacionais responsáveis pelo paciente.

Todos os profissionais devem ser devidamente qualificados, registrados e/ou credenciados em seus respectivos órgãos/conselhos de regulamentação profissional. Qualquer tipo de modificação e/ou adaptação estrutural; de forma; de geometria; de materiais, em um ou mais componentes do u-neck® – não limitando-se apenas a isto – cancela a garantia do u-neck®. Observa-se também que sanções jurídicas podem ser aplicadas.

## **COMPOSIÇÃO**

Termoplástico de engenharia, espuma elastomérica, tecido de lycra hipoalergênica, fecho de contato e Neoprene.

Não contém nenhum tipo de metal em sua composição.

## INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

Somente lavagem manual, com água fria, sabonete ou detergente hipoalergênico de Ph neutro.

Secagem à sombra.

Não usar água quente acima de 65 graus celsius, não utilizar qualquer tipo de alvejante, não passar, não lavar à seco, não lavar e/ou secar em tambor rotativo.

Não expor a nenhum tipo de fonte de calor direta, como exemplo: fogo, secadores de cabelo - não limitando-se apenas a isso.

Não nos responsabilizamos por danos à peça e/ou à saúde, decorrentes do uso de produtos de limpeza ou de quaisquer outros produtos que não sejam os supracitados na higienização do u-neck® (sabonete ou detergente hipoalergênico de Ph neutro).

Apesar dos componentes do u-neck® serem hipoalergênicos, qualquer produto - que não os recomendados na lavagem - podem deixar resíduos no u-neck®.

Em caso de alergias e/ou irritações, procure um dermatologista.

Não utilizar abrasivos.



## CUIDADOS COM TRATAMENTO E UTILIZAÇÃO

Para manter o u-neck® em perfeitas condições de uso, é importante ter cuidado. Não expor a lugares quentes e úmidos, jamais colocar perto de labaredas ou qualquer tipo de fogo ou fonte de calor direta.

Sem contato com óleo, gordura, e/ou lubrificantes sólidos ou líquidos.

O u-neck® possui um rigoroso controle de qualidade.

Seguir as recomendações de uso e conservação, proporciona uma ótima duração de sua vida útil.

## DÚVIDAS RELACIONADAS AO U-NECK®

ENTRE EM CONTATO CONOSCO POR E-MAIL, WHATSAPP OU TELEFONE.

(11) 94048-3939

CONTATO@BFORTESES.COM



Colar-órtese de nome comercial u-neck®, suas patentes e todas suas representações imagéticas são propriedade intelectual da joint-venture BF Órteses® - Ortocinética® - Todos os direitos reservados.

A marca u-neck®, seu logotipo e representações imagéticas são propriedade intelectual da joint-venture BF Órteses® - Ortocinética® - Todos os direitos reservados.

Ortocinética®, seu logotipo e representações imagéticas são propriedade intelectual de Ortocinética® - Todos os direitos reservados.

BF Órteses® - nº cnpj 57.600.001/0001-94- 2024- Todos os direitos reservados.